






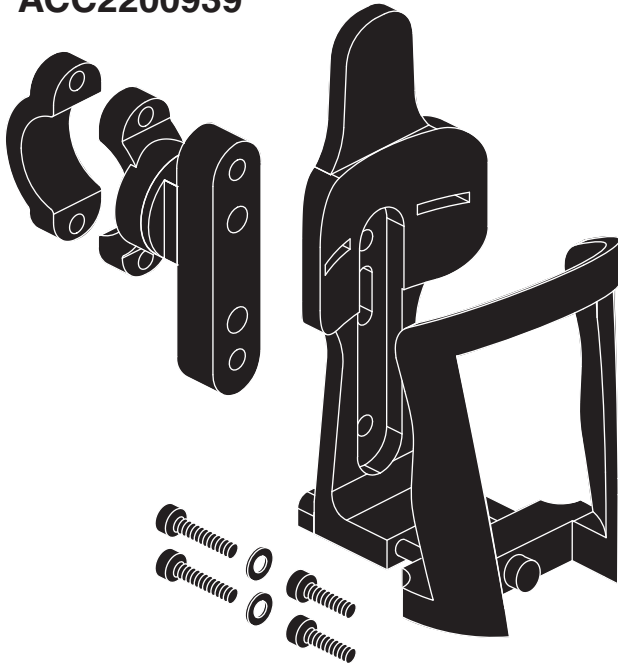

**i-Go Cup Holder Accessory • Accessoire porte-gobelet i-Go  
i-Go Bekerhouder Accessoire • i-Go Getränkehalter-Zubehör  
Accessorio portabicchieri i-Go • Accesorio portavasos i-Go**

**ACC2200939**



**Contents • Contenu • Inhoud  
Inhalt • Contenido • Contenido**

A	 x1	B	 x1
D	 x2	C	 x1
F	 x2	E	 x2

**Tools needed:**

- Standard wrench set

**Benodigd gereedschap:**

- Standaard sleutel set

**Utensili necessari:**

- Set di chiavi standard

**Outils nécessaires:**

- Jeu de clés standard

**Benötigtes Werkzeug:**

- Standard-Schlüsselsatz

**Herramientas necesarias:**

- Sistema de la llave estándar

If you require any assistance with these instructions, please call **Pride Technical Service** at **1-877-800-1248**.  
**Canada providers**, phone **1-888-570-1113**.

Si vous avez besoin d'aide avec ces instructions, veuillez contacter l'assistance à la clientèle de **Pride** au **1-888-570-1113**.

Indien u hulp nodig heeft bij deze instructies, kunt u contact opnemen met de **Technische Dienst van Pride**.


Falls Sie Hilfe zu diesen Anweisungen benötigen, kontaktieren Sie bitte den **Kundendienst von Pride**.

Per assistenza sulle presenti istruzioni contattare il **servizio tecnico Pride** al numero **0765-451301**.

Si precisa asistencia con estas instrucciones, llame al **Servicio técnico de Pride**.



1

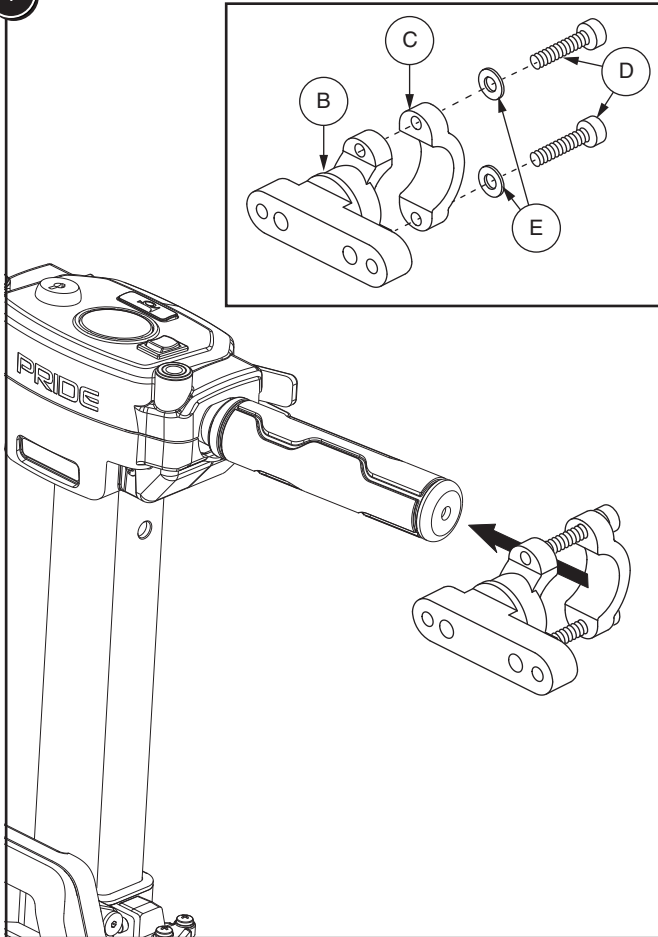

Assemble the cup holder bracket by attaching the front bracket (B) to the rear bracket (C) using two screws (D) and washers (E). Slide the cup holder bracket assembly on to the tiller handle as shown.

Assemblez le support du porte-gobelet en fixant le support avant (B) au support arrière (C) à l'aide de deux vis (D) et rondelles (E). Faites glisser l'assemblage du support du porte-gobelet sur la poignée de la barre comme illustré.


Monteer de beugel van de bekerhouder door de voorste beugel (B) aan de achterste beugel (C) te bevestigen met behulp van twee schroeven (D) en ringen (E). Schuif de bekerhouderbeugel op de stuurhendel zoals afgebeeld.

Montieren Sie die Getränkehalterhalterung, indem Sie die vordere Halterung (B) mit zwei Schrauben (D) und Unterlegscheiben (E) an der hinteren Halterung (C) befestigen. Schieben Sie die Halterungsbaugruppe des Getränkehalters wie abgebildet auf die Ruderpinne.

Montare la staffa portabevande fissando la staffa anteriore (B) alla staffa posteriore (C) mediante due viti (D) e rondelle (E). Far scorrere il gruppo staffa portabicchieri sulla maniglia del timone come mostrato.

Ensamble el soporte del portavasos uniendo el soporte delantero (B) al soporte trasero (C) usando dos tornillos (D) y arandelas (E). Deslice el conjunto del soporte del portavasos en el mango popero como se muestra.

2

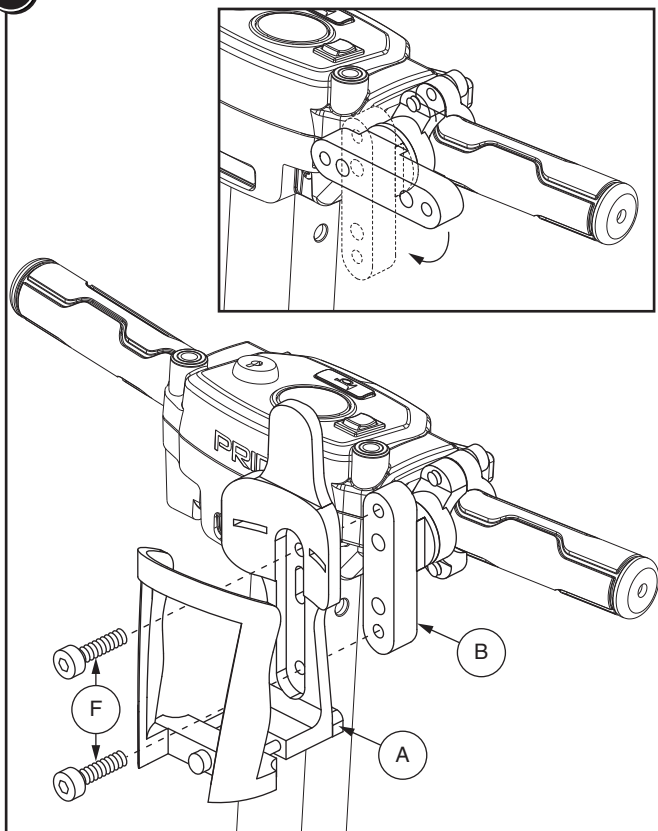

Swivel the front bracket anchor (B) to the vertical position. Attach the cup holder assembly (A) to the bracket anchor using two screws (F).

Faites pivoter l'ancrage du support avant (B) en position verticale. Fixez l'assemblage du porte-gobelet (A) à l'ancrage du support à l'aide de deux vis (F).


Draai het voorste beugelanker (B) naar de verticale positie. Bevestig de bekerhouder (A) aan het beugelanker met behulp van twee schroeven (F).

Schwenken Sie den Anker der vorderen Halterung (B) in die vertikale Position. Befestigen Sie die Getränkehalterbaugruppe (A) mit zwei Schrauben (F) an der Halterungsverankerung.

Orientare l'ancoraggio della staffa anteriore (B) in posizione verticale. Fissare il gruppo portabicchieri (A) all'ancoraggio della staffa utilizzando due viti (F).

Gire el anclaje del soporte delantero (B) a la posición vertical. Fije el conjunto del portavasos (A) al anclaje del soporte con dos tornillos (F).

3

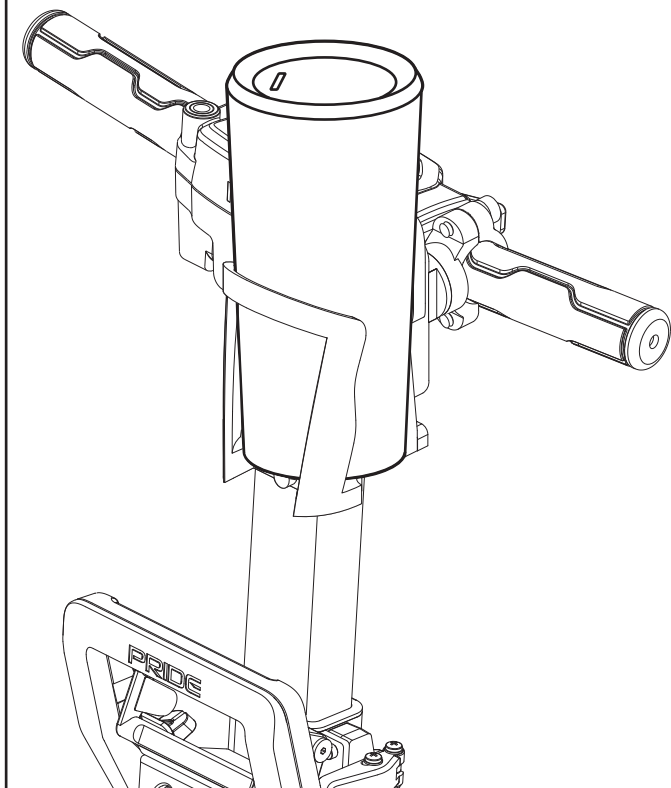

Your cup holder is now ready for use.

Votre porte-gobelet est maintenant prêt à l'emploi.

Uw bekerhouder is nu klaar voor gebruik.

Ihr Getränkehalter ist jetzt einsatzbereit.

Il tuo portabicchieri è ora pronto per l'uso.

Su portavasos ya está listo para usar.